



D E V E A U X



Masque de confinement Masque lavable à usage non sanitaire de catégorie 1 (UNS1)

Référence : **SAFY**

(Selon la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 révisée le 26 avril)

Avertissement : pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

Masque homologué pour le territoire français et outre-mer uniquement. Si vous résidez dans un pays étranger, nos masques n'ont pas l'homologation requise du pays résident, nous n'engagerons pas notre responsabilité sur leurs utilisations.

Un premier cycle d'entretien est requis avant le 1er usage.

Composition : Matières principales : 57% coton, 42% polyester, 1% lycra.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche, votre nez et votre menton.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant, c'est un masque **grand public.**
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**
- **Afin de garder ses performances et son confort, il est indispensable que le masque conserve son aspect original (légèrement froissé)**



SÉCURITÉ

Performances :

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA Maîtrise RNBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport 1 lavage pour 1ère utilisation RP/20-3545/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1), qui supporte 10 lavages (RP/20-3645/DGAMNRBC/2000305/NP version 1) et 30 lavages (IFTH 2020-04-17-158-1)

Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m}$ > 90% (particules émises par le porteur).

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².s-1 pour une dépression de 100 Pa.

Test au porter établi par nos soins : 4 heures consécutives maximum.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

- Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez :

- Évitez de le toucher et de le déplacer.
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

- Quand vous avez porté le masque 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Quand il devient difficile de respirer.
- Si le masque s'humidifie.
- Si le masque est endommagé.
- Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
- En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :


- Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

- Lavez le masque à la machine dans un filet à linge avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
- Ce masque a été testé pour 30 lavages. Après 30 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

Après le lavage :

- Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
- Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

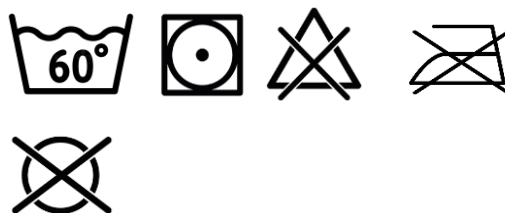

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrite ci-dessus.

DEVEAUX S.A.S

11 chemin de la Tuilière, 69240, Saint-Vincent de Reins-France
Tél : 04 74 89 69 68 solidarite@deveaux.com



D E V E A U X



Ref SAFY
CATEGORIE UNS1

Un premier cycle d'entretien requis avant le 1er usage

Composition: 57% Coton, 42% Polyester, 1% Lycra

Lavage dans un filet recommandé

Résiste à 30 lavages minimum



COMMENT UTILISER NOTRE MASQUE ?

1. AVANT LA 1ERE UTILISATION ET ENTRE CHAQUE UTILISATION



Se laver les mains
avant et après utilisation

2. POUR METTRE ET ENLEVER SON MASQUE



Mettre et enlever le
masque en utilisant les
attaches sur les côtés



Positionnez le
masque de façon à
recouvrir le nez, la
bouche et le menton



Ajuster la barrette au
niveau de votre nez



Ne plus toucher le
masque après l'avoir
positionné



Changer de masque
après 4 heures
d'utilisation

3. NETTOYAGE DU MASQUE



Laver le masque à
60° immédiatement
après utilisation
dans un filet de
protection



Utiliser un sèche
linge, un sèche
cheveux ou encore
faire sécher les
masques à l'air libre



Il est conseillé de le
vaporiser à une
distance de 2 cm



Ne pas repasser:
Le masque devant
garder ses soufflets
et son aspect froissé
pour une meilleure
respirabilité

4. UTILISER LE MASQUE UNIQUEMENT SI VOUS SORTEZ

5. CONSERVER LES GESTES BARRIERES